

InfuseIT®

Övertrycksmanschetter för en patient och för flergångsbruk



Bra upphängningsanordning som är robust och lätt att hänga upp oavsett höjd på droppställningen.



- Transparent framsida gör infusionspåsens innehåll väl synligt.
- Kroken för att hänga upp infusionsvätskan är hållbar och utformad för att passa olika påsar
- Hållbar konstruktion— kan inte slitas eller dras isär.

• Flergångsprodukten InfuseIT har slitstark nylon utformad för att hålla även efter många rengöringar .



- Unik mätning, enkel att avläsa genom det 360 graders fönstret, även på långt håll.
- När trycket når det röda området reagerar en automatisk avluftningsventil och reducerar trycket till en säker nivå.



- Välj mellan trevägskransventil eller tumskruvsventil. (Ej flergångsprodukter).



- Effektiv och anpassad handpump gör tryckfyllnad enkel.

Rengöringsinstruktion:

Obs: Blötlägg inte InfuseIT.

Manschetten kan rengöras genom att använda en av följande metoder:

- Torka av InfuseIT med antingen en 10% blekmedelslösning eller isopropylalkohol.
- Använd en mjuk borste eller trasa för att ta bort fläckar.
- Skölj noga med rent vatten. Se till att inget vatten kommer in i ventilationshålet i mätaren.
- Låt InfuseIT lufttorka före nästa användning.

Alternativt, kan följande produkter på ett säkert sätt användas för att rengöra InfuseIT om man följer tillverkarens anvisningar:

- Sporidicin®, våtservetter PDI® Super Sani-Cloth®

Orderinformation:



Disposable

DESCRIPTION	PRODUCT NUMBER
InfuseIT 500 mL with stopcock valve, 10/box	ZIT-500-10
InfuseIT 500 mL with thumbwheel valve, 10/box	ZIT-502-10
InfuseIT 1000 mL with stopcock valve, 10/box	ZIT-1000-10
InfuseIT 1000 mL with thumbwheel valve, 10/box	ZIT-1002-10
InfuseIT 3000 mL with stopcock valve, 10/box	ZIT-3000-10
InfuseIT 3000 mL with thumbwheel valve, 10/box	ZIT-3002-10

Reusable

DESCRIPTION	PRODUCT NUMBER
InfuseIT 500 mL with stopcock valve, 5/box	ZIT-520-5
InfuseIT 1000 mL with stopcock valve, 5/box	ZIT-1020-5

For information or product support:

1-800-421-0024

customercare@salterlabs.com

2365 Camino Vida Roble – Carlsbad, CA 92011
Phone: 661-854-3166, 1-800-421-0024, 1-800-235-4203
Fax: 661-854-3850
Toll-Free Fax: 1-800-628-4690
E-mail: salter@salterlabs.com
www.salterlabs.com

Printed in U.S.A. SLML-150B, Rev. Sept. 2015

Distributed by:

VINGMED

Vingmed AB

Box 576, 175 26 Järfälla

Tel: 08-583 593 00

Fax: 08-583 570 10

E-post: info@vingmed.se

 **SALTER LABS®**
DESIGN INNOVATIONS
FOR RESPIRATORY CARE